


MG-203 醫院管理系統

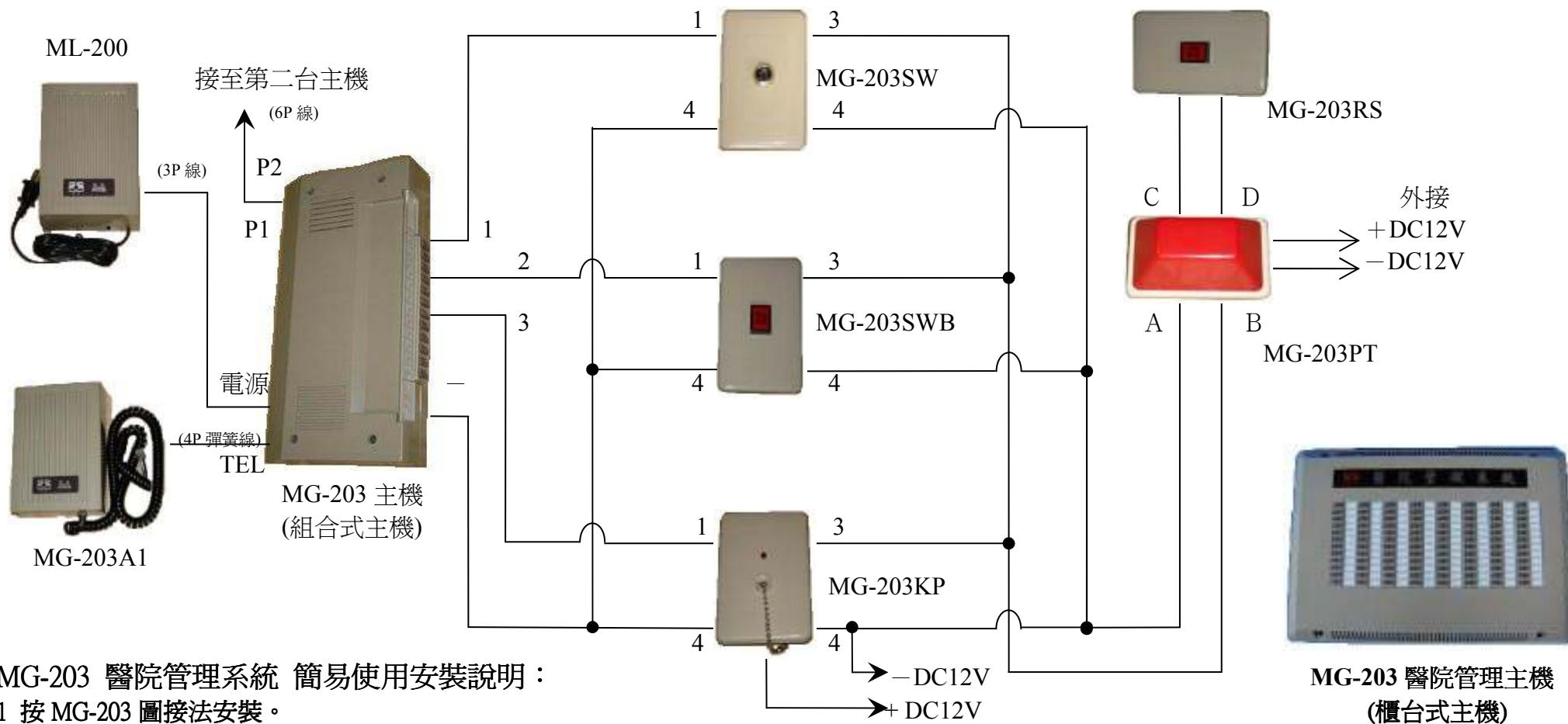

MG-203 醫院管理系統 簡易使用安裝說明：

- 1 按 MG-203 圖接法安裝。
 - 2 安裝時 MG-203A1 音樂盒接於主機(MG-203)的 TEL 的位置上。
 - 3 安裝整流器，取出 MG-203A1 隨附的電源專用線，一端接於主機 MG-203 內的電源位置上，一端接於 ML-200 開鎖整流器(POWER)內的 3P 端子位置即完成電源連接安裝。
 - 4 呼叫主機時按緊急呼叫鈕 MG-203SW，主機燈號亮起後(漸漸熄滅)音樂響起，按下燈亮之按鍵燈號熄滅音樂暫停待機。
 - 5 緊急呼叫鈕 MG-203SW(MG-203SWB) ①號線(黃)接到主機 MG-203 的號碼端子位置，而④號線(黑)接到負端(-)的位置即完成安裝，如有安裝緊急門口燈(MG-203PT)時③號線接到門口燈的 B 點上，A 點接負電。
 - 6 門口燈需外加 DC12V 的電源(燈泡 12V/1.5W)，A 點與 B 點短路燈號亮起，C 點與 D 點為消除鈕接點。
 - 7 如主機為櫃檯桌上型 2・3 項已安裝於主機內可省略。
 - 8 呼叫附件請參考公司型錄或上網。
- + DC12V

(櫃台式主機)
- <http://www.mingood.com.tw/intcom> 查詢

2009981020 製